




«Устройство»

1. Кнопка включения/выключения питания
2. Регулятор громкости/ Кнопка переключения программ
3. Корпус слухового аппарата
4. Микрофон

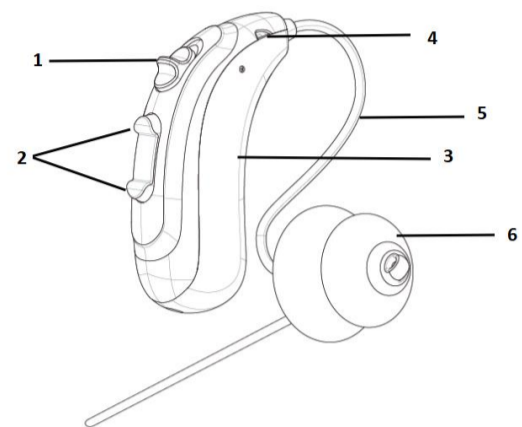


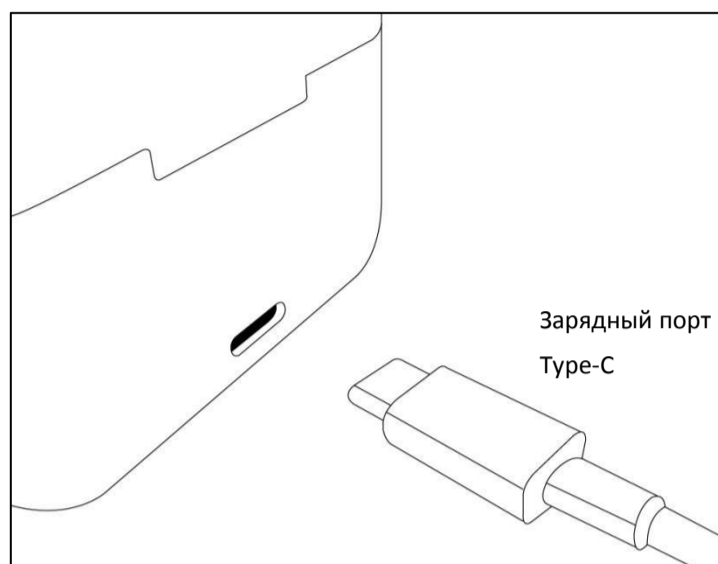


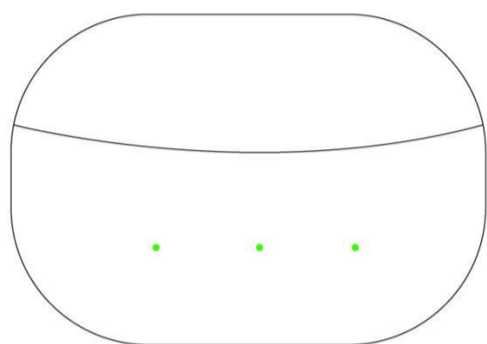


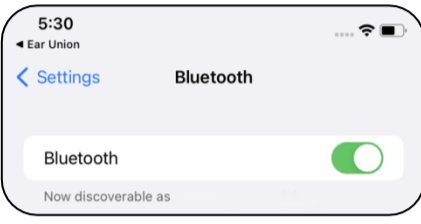
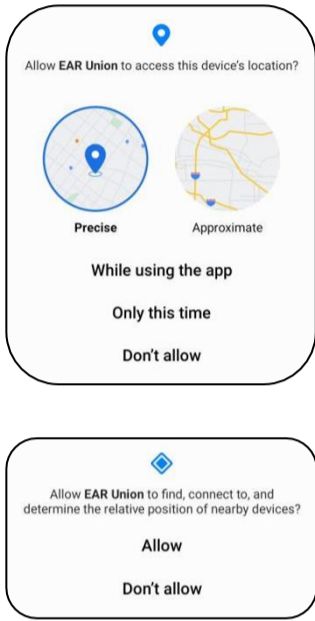
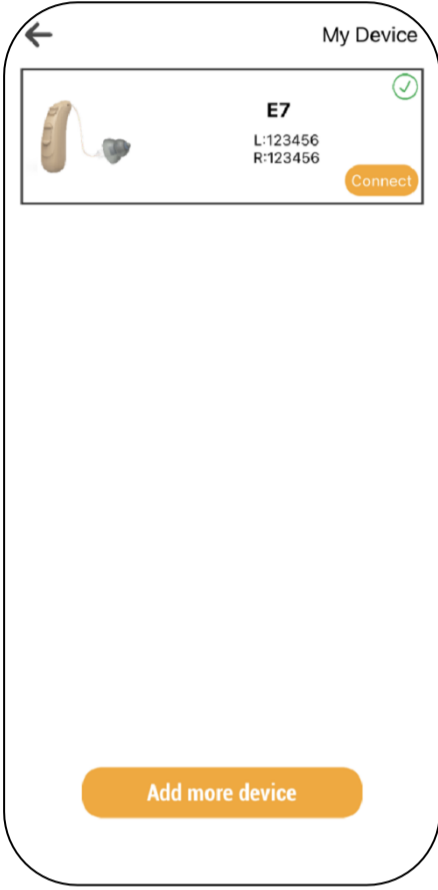
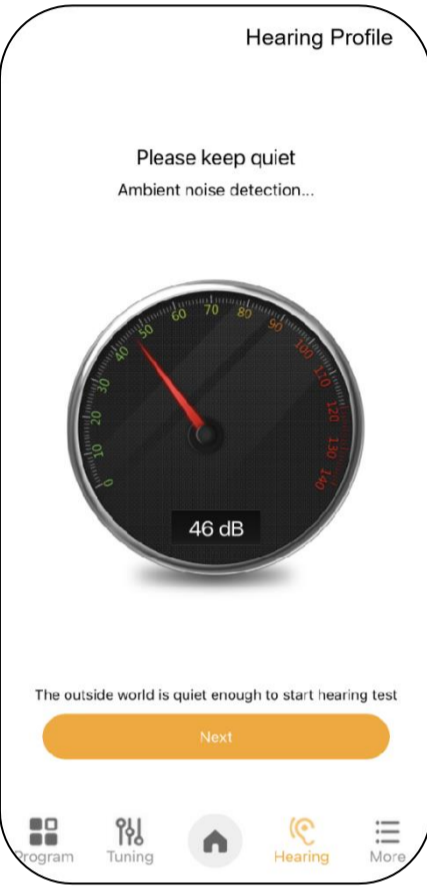
| Описание индикатора зарядки | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---|
| Условия эксплуатации | | Индикатор | Состояние |
| Зарядный блок: Не заряжается | Слуховые аппараты находятся вне зарядного блока. | ○ ○ ○ | Зарядный блок в режиме ожидания. |
| | Слуховые аппараты находятся в зарядном блоке. Открытие зарядного блока. | ○ ○ ○ | Слуховой аппарат не заряжен или зарядный блок разряжен. |
| | | ● ○ ● | Когда слуховые аппараты заряжаются, индикаторы мигают в течение 8 секунд, а затем гаснут. |
| | | ● ○ ● | Когда слуховые аппараты заряжены, индикаторы горят в течение 10 секунд, а затем гаснут. |
| Зарядный блок: Подзарядка | Слуховые аппараты находятся вне зарядного блока. | ○ ● ○ | Зарядный блок заряжается, индикатор мигает. |
| | | ○ ● ○ | Зарядный блок полностью заряжен, индикатор горит. |
| | Слуховые аппараты находятся в зарядном блоке. | ● ○ ● | Слуховые аппараты заряжаются, индикаторы мигают. |
| | | ● ○ ● | Слуховые аппараты полностью заряжены, индикаторы горят. |
| | | ● ● ● | Слуховые аппараты и зарядный блок полностью заряжены, индикаторы горят. |




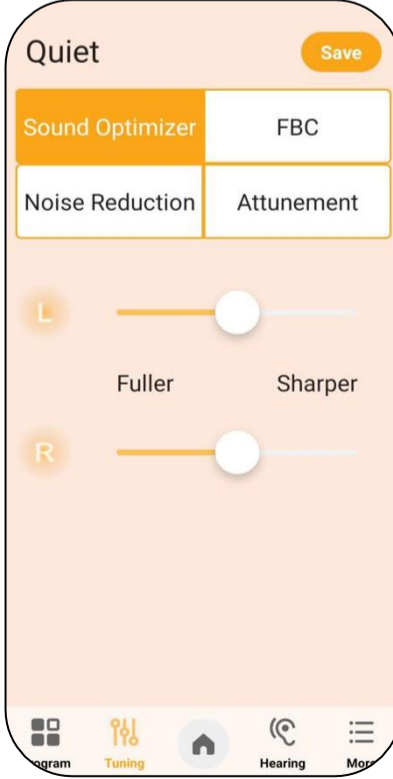
«Настройки программы»

| Программа | Описание |
|-----------|----------------------|
| P1 | Тихая обстановка |
| P2 | Шумная обстановка |
| P3 | Индивидуальный режим |

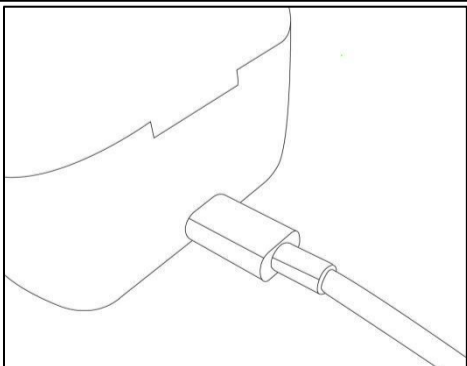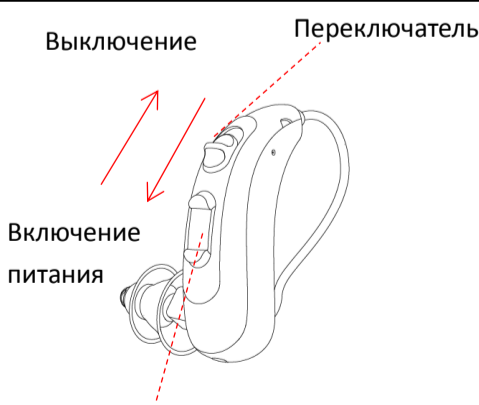«Этапы эксплуатации»

| Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4 |
|---|--|---|---|
| <p>Выход из спящего режима: Вставьте кабель с разъемом Type-C в зарядный порт и подключите питание.</p> <p>При первом использовании рекомендуется заряжать устройство в течение 3 часов, пока не загорятся индикаторы зарядки.</p> | <p>Включение/выключение питания:</p> <p>После полной зарядки, извлеките слуховой аппарат из зарядного блока, переместите переключатель вниз, чтобы включить питание. Перед тем как поместить слуховой аппарат обратно в зарядный блок, переместите переключатель в верхнее положение, чтобы выключить слуховой аппарат.</p> | <p>Носите слуховой аппарат правильно.</p> <p>Напоминание: Во избежание свистящих звуков выбирайте ушные вкладыши соответствующего размера.</p> | <p>Скачивание мобильного приложения:</p> <p>Для загрузки приложения отсканируйте QR-код.</p> |
|  | <p>Выключение</p> <p>Переключатель</p>  <p>Включение питания</p> <p>Однократное нажатие кнопки изменит громкость.</p> <p>Удерживание кнопки >3 секунд активирует автоматическую смену программы, при этом раздастся звуковой сигнал.</p> |  |  |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p align="center">Шаг 5</p> <p>Работа в режиме Bluetooth: Войдите в настройки Bluetooth на телефоне, включите Bluetooth и вернитесь в приложение Ear Union.</p> | <p align="center">Шаг 6</p> <p>Авторизация в приложении: Для авторизации разрешите использование данных о местонахождении мобильного телефона. (Система Android должна разрешить авторизацию).</p> | <p align="center">Шаг 7</p> <p>Приложение автоматически запустит поиск слуховых аппаратов: Нажмите кнопку «Connect»  (Подключение) для сопряжения устройств. Если ваше устройство не отображается в списке, нажмите кнопку «Add more devices» (Добавить дополнительные устройства).</p> | <p align="center">Шаг 8</p> <p>Персональный профиль: После сопряжения устройство автоматически перейдет к настройке Персонального профиля. Для этого необходимо выполнить указанные действия. Примечание: Если вы пропустили этот шаг, вы можете нажать кнопку «Hearing» (Настройка акустических параметров) на главной странице и пройти тест еще раз.</p> |
|  |  |  |  |
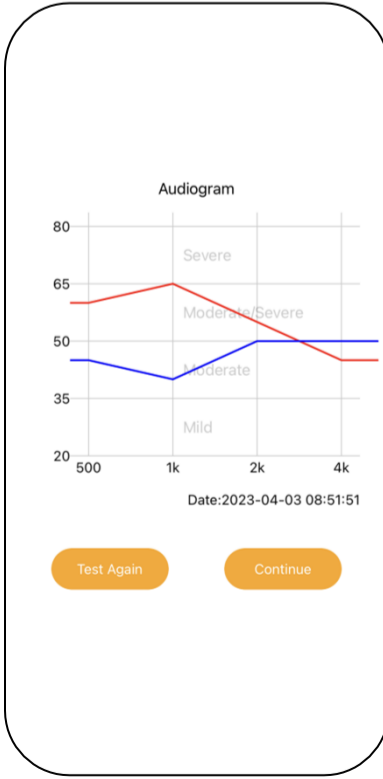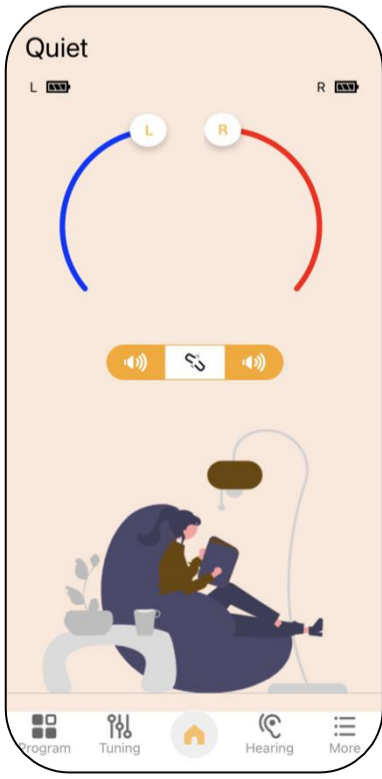
| | | | |
|---|---|---|--|
| <p align="center">Шаг 9</p> <p>Оптимизация: После завершения теста нажмите на кнопку «Continue» (Продолжить). Приложение автоматически оптимизирует компенсацию слуха в соответствии с результатами теста и вернется на главную страницу.</p> | <p align="center">Шаг 10</p> <p>Регулировка громкости: После возвращения на главную страницу можно настроить слуховые аппараты вместе или по отдельности. Примечание: Когда слуховой аппарат подключен к приложению, кнопка на корпусе устройства становится неактивной.</p> | <p align="center">Шаг 11</p> <p>Выбор программы: Предусмотрено всего 6 пользовательских программ, включая 2 программы по умолчанию и 1 дополнительную программу. Каждая программа настраивается автоматически в соответствии с Персональным профилем.</p> | <p align="center">Шаг 12</p> <p>Оптимизация звука: Пользователь может регулировать общее усиление низких и высоких частот. Более глубокое звучание — больше низких частот, звук глубокий и мощный Более резкое звучание — больше высоких частот, звук резкий и громкий</p> |
|  |  |  |  |

Шаг 13

Настройка системы подавления обратной связи: Если слуховой аппарат продолжает издавать свистящие звуки, нажмите на кнопку сброса пути обратной связи.

Примечание: Носите слуховые аппараты правильно. Звук при тестировании относительно громкий, пожалуйста, наберитесь терпения.

Шаг 14

Настройка шумоподавления: Предусмотрена система четырехуровневого подавления шума. Если окружающая обстановка кажется слишком шумной, вы можете выбрать более высокий уровень шумоподавления.




Шаг 15

Настройка созвучности: В приложении можно настроить различные диапазоны частот слуховых аппаратов: низкие, средние и высокие частоты.

Если вы хотите настроить дополнительные параметры, нажмите кнопку «Equalizer» (Эквалайзер), чтобы увидеть 16 диапазонов частот слуховых аппаратов.

Шаг 16

Сохранение настроек: После настройки нажмите кнопку «Save» (Сохранить), чтобы сохранить выбранные параметры в программе слухового аппарата.

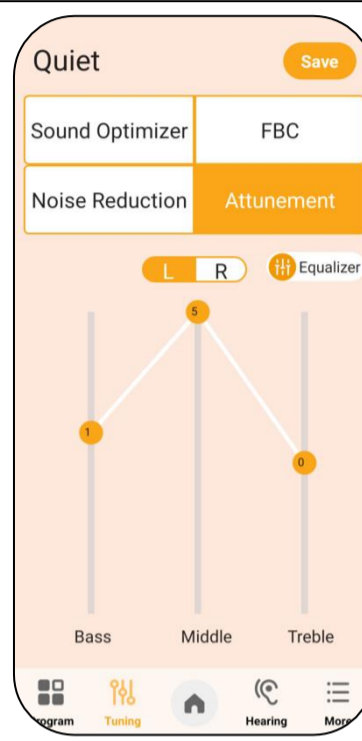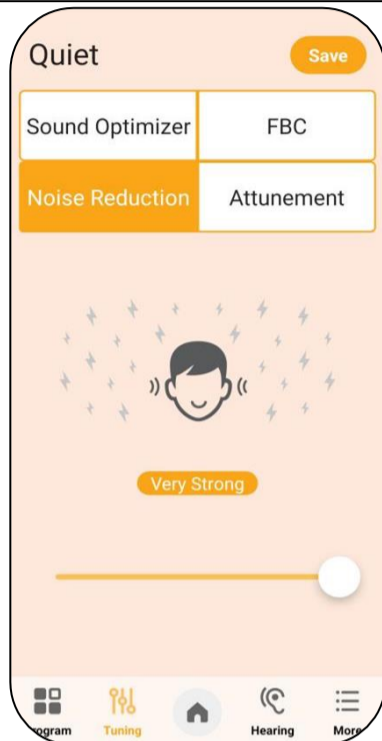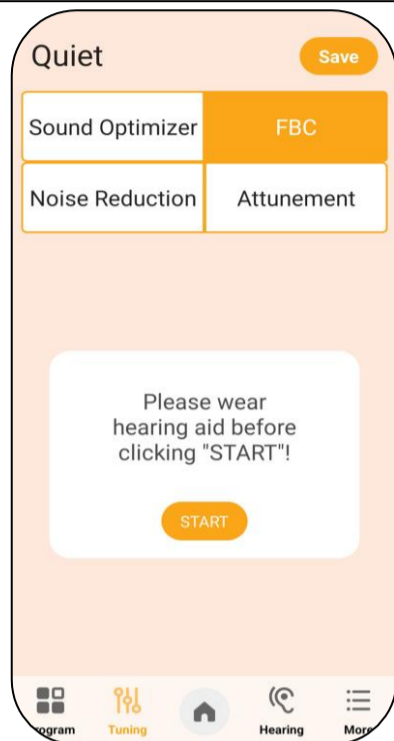


Шаг 17




Настройки устройства

Сброс до заводских настроек: Если вы хотите сбросить акустические параметры слухового аппарата, нажмите кнопку «Reset» (Сброс) и они вернутся к исходным настройкам.

Бинауральная синхронизация громкости: Левый и правый слуховой аппарат передают информацию посредством сигналов Bluetooth, что обеспечивает одинаковое восприятие звука в обоих ушах. Соответственно, если вы хотите отрегулировать громкость или настроить программу для каждого устройства отдельно, отключите функцию бинауральной синхронизации.

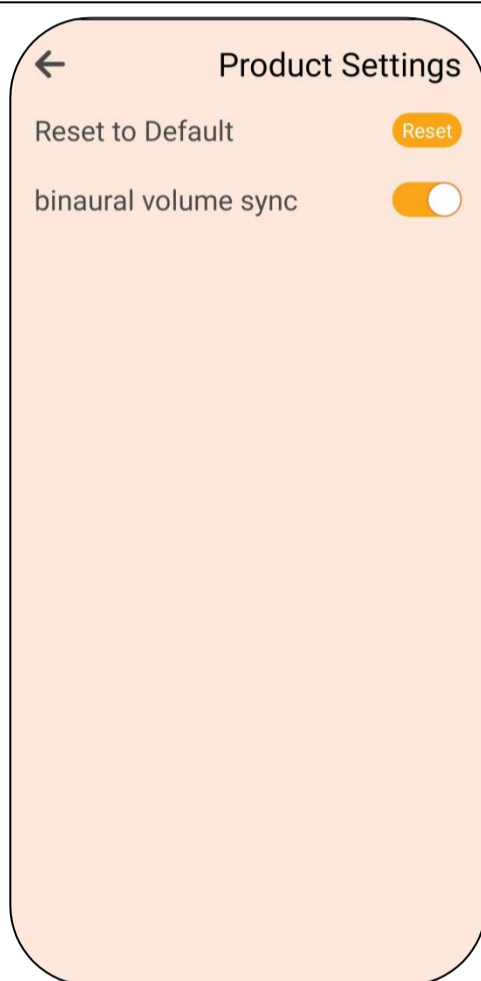

«Замена фильтров (предназначены для защиты устройства от ушной серы)»
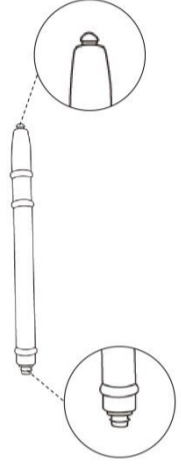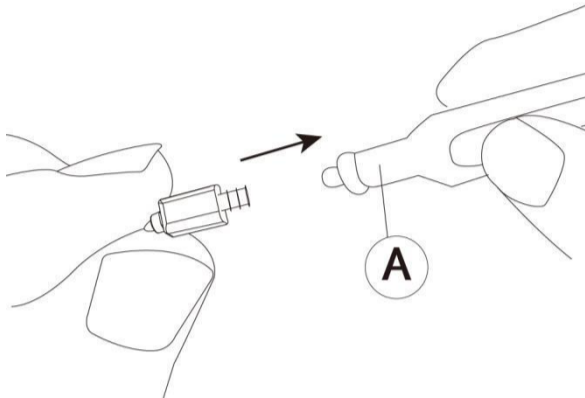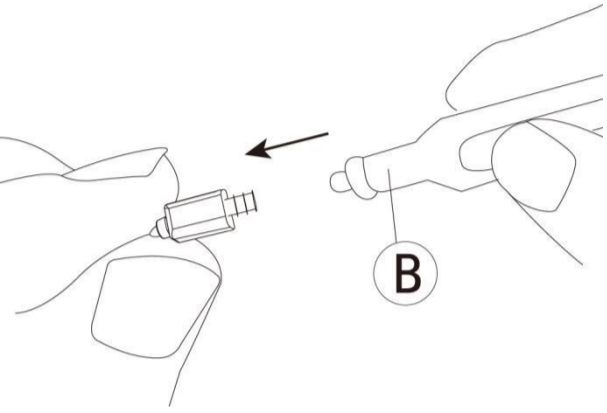
| <p>Шаг 1</p> <p>Распакуйте фильтр и достаньте инструмент для извлечения фильтра:</p> <p>Оранжевый наконечник (сторона А) — это инструмент для извлечения фильтра, а белый наконечник (сторона Б) — новый фильтр.</p> | <p>Шаг 2</p> <p>Извлечение УСТАНОВЛЕННОГО фильтра:</p> <p>Возьмите в одну руку инструмент для извлечения фильтра, а в другую — слуховой аппарат. Извлеките установленный фильтр с помощью инструмента (сторона А).</p> | <p>Шаг 3</p> <p>Установка НОВОГО фильтра:</p> <p>Плотно вставьте НОВЫЙ фильтр в отверстие звуковода с помощью инструмента (сторона Б). После этого извлеките инструмент. Замена фильтра для защиты устройства от ушной серы завершена.</p> |
|---|---|---|
| <p>Сторона А: Наконечник</p>  <p>Сторона Б: Фильтр</p> |  |  |

Рекомендации:

Вопрос 1: Что делать, если кнопка слухового аппарата не работает?

Решение: Когда слуховой аппарат подключен к мобильному приложению, кнопки устройства неактивны. Отключите слуховой аппарат от мобильного приложения и перезапустите устройство.

Вопрос 2: Слуховой аппарат не сопрягается с мобильным приложением.

Решение: Убедитесь, что версия Android мобильного телефона выше 8, версия системы iOS выше 11, передача данных по Bluetooth включена, затем выполните шаги 4-7 настоящего руководства.

Вопрос 3: Слуховой аппарат был подключен к приложению раньше, но сейчас подключение отсутствует.

Решение 1: Выключите слуховой аппарат и поместите его в зарядный блок, затем извлеките его оттуда и включите снова.

Решение 2: Удалите запись о соединении в приложении EAR Union, запустите поиск устройств повторно и перезапустите слуховой аппарат.

Решение 3: После удаления записи о соединении в приложении EAR Union закройте все приложения, запущенные на мобильном телефоне, откройте EAR Union, перезагрузите слуховой аппарат и повторите поиск устройств.